

SINAPI

urinómetro

Urinómetro de alta qualidade com reservatório de 500ml, saco de grande volume e torneira rotativa antigermes Germ Guard.

REF **SUM500V2**

COMPOSIÇÃO:


1 Saco de Drenagem de 2.000ml pré-ligado ao Urinómetro de 500ml.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Instalação: utilizar os ganchos para suspender o urinómetro do quadro da cama.
2. Amostragem de urina a partir do reservatório (Fig. 1): rodar a torneira para a direita para abrir e para a esquerda para fechar; se necessário, utilizar uma seringa Luer Lock.
3. Descarga do reservatório para o saco (Fig. 2): segurar o depósito pela base e colocá-lo suavemente em posição horizontal.
4. Drenagem do saco (Fig. 3): rodar a torneira do saco para a direita para abrir e para a esquerda para fechar.
5. Amostragem de urina a partir da união do cateter (Fig. 4): limpar a superfície da porta com um antisséptico; inserir na porta a seringa Luer Slip sem agulha; extrair a amostra e retirar a seringa.

ATENÇÃO: Recomenda-se a não utilização de agulhas e cânulas rombas convencionais já que podem danificar a porta "sem agulha".

Nota: os volumes indicados são aproximados..

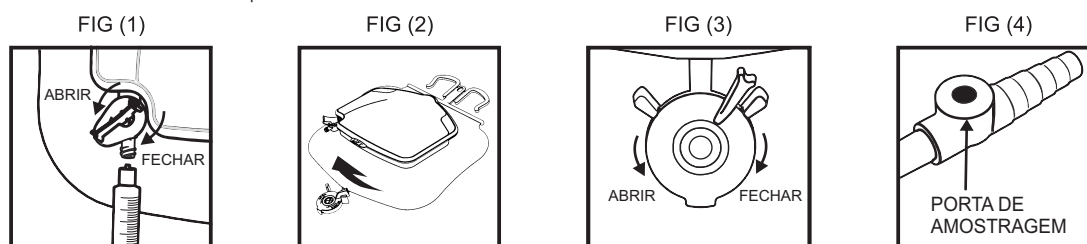

ATENÇÃO: A lei federal limita a venda deste dispositivo a médicos ou por prescrição médica.

FABRICADO NA ÁFRICA DO SUL



SINAPI biomedical (Pty) Ltd.
ARC Infruitec North Campus
Lelie Road, Stellenbosch, 7600, South Africa
Tel: +27 21 887 5260 Fax: +27 21 887 3059
email: sales@sinapibiomedical.com



mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71 D-30855 Hannover-Langenhagen



Isento de látex



Isento de Dietil hexil ftalato



Evitar temperaturas extremas



Uso Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada



Uso Único



Utilizar Ver Instruções de Utilização



Este dispositivo não pode ser reutilizado. A funcionalidade e a esterilidade ficariam altamente comprometidas. Risco de infeção.