

SINAPI

ürinmetre

500 ml toplama kabı, büyük torba ve bakteri korumalı dönen musluk'lu yüksek kaliteli Ürünmetre.

REF SUM500V2


İÇERİK
500 ml'lik Ürünmetreye bağlı 1 x 2000 ml Drenaj Torbası

KULLANMA TALİMATI

1. Ürünmetrenin asılması: Kancaları kullanarak yatak kenarına asınız.
2. Hazneden idrar örneği alma : Şekil (1) Musluğu açmak için saat yönünün tersine çevirin. Kapatmak için saat yönünde çevirin. İhtiyaç halinde Luer Lock kilitli şırınga takınız.
3. Hazedeki idrarı torbaya boşaltma: Şekil (2) Haznenin altından kaldırarak yatay pozisyona gelene kadar kaldırın.
4. Torba Boşaltma: Şekil (3) - Musluğu açmak için saat yönünün tersine çevirin. Kapatmak için saat yönünde çevirin.
5. Kateter konnektöründen idrar numunesi alma : Şekil (4) Port yüzeyini antiseptikle temizleyin, İğnesiz luer slip şırıngayı porta takın. Numuneyi alıp şırıngayı çekin.

UYARI: Geleneksel iğneli şırıngalar ve künt kateterler iğnesiz porta zarar verebilir.

Not: Cihaz hacimleri yaklaşık olarak verilmiştir.

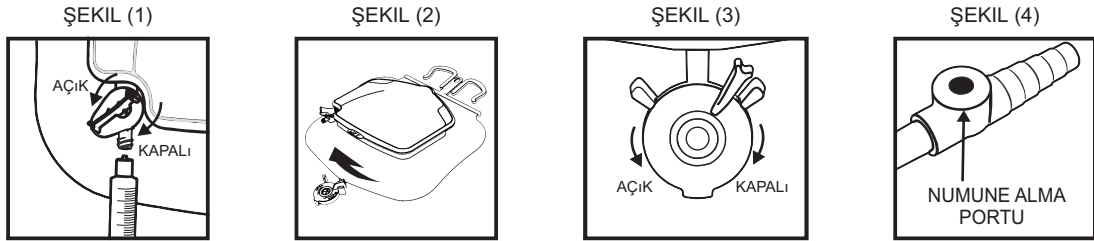

UYARI: Federal yasa uyarınca, bu cihaz yalnızca bir hekim tarafından veya hekimin talimatı üzerine satılabilir.

CE
1639

STERIL

EO

EC

REP

mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71 D-30855 Hannover-Langenhagen



SINAPI biomedical (Pty) Ltd.
ARC Infruitec North Campus
Lelie Road, Stellenbosch, 7600, Güney Afrika
Tel: +27 21 887 5260 Fax: +27 21 887 3059
e-posta: sales@sinapibiomedical.com

Son kullanım tarihi
LOT



Lateks içermez.



DEHP içermez.



Aşırı ısıdan koruyun.



Ambalaj açılmış veya hasar görmüşse kullanmayın.



Tek Kullanımlık.



Kullanım kılavuzuna bakın.



Bu cihaz tekrar kullanılmamalıdır. Fonksiyonellik ve Sterilite tehlikeye girer. Enfeksiyon riski.